


IDEXX inVue Dx™ Photo de la cytologie auriculaire et interprétation des résultats


Assurez-vous que vos images illustrent correctement les bonnes techniques de préparation d'échantillons.

Volume d'échantillon approprié

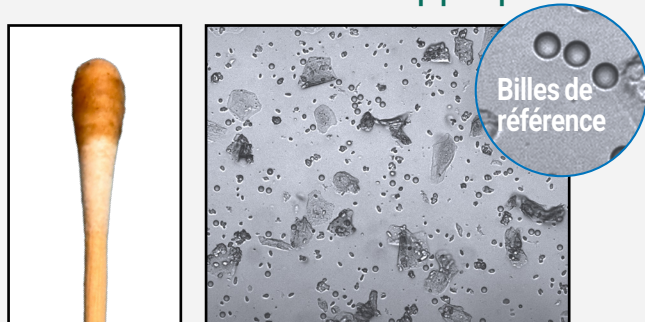


L'utilisation du volume d'échantillon approprié garantit l'obtention de résultats et d'images fiables.

Trop d'échantillon

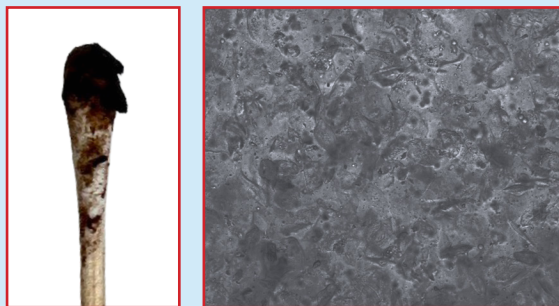

Les agrégats et les amas peuvent encombrer la vue, entraînant des résultats faussés.

Pas assez d'échantillon



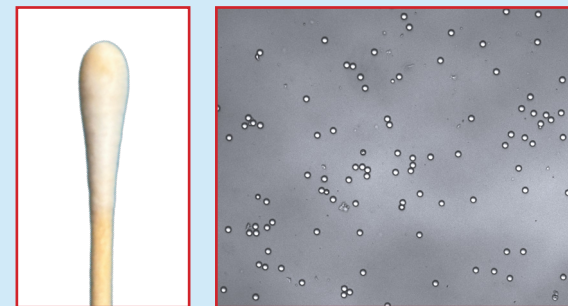





L'absence de quantité cellulaire empêche d'obtenir des résultats et des images reflétant fidèlement l'état du patient.

Remarque : les éléments ronds (clairement visibles en champ clair et apparaissant en rouge dans les images composites) sont des billes de référence. Elles aident l'analyseur à se concentrer sur l'échantillon et permettent de vérifier que les techniques de préparation appropriées (volume d'échantillon approprié, inversion de l'échantillon et distribution complète dans la cartouche) ont été utilisées.

Vérifiez vos résultats à l'aide des images.

Les images et les résultats semi-quantitatifs fournis par l'analyseur sont en corrélation directe avec la qualité de l'échantillon et la quantité fournie à l'analyseur. Il est donc important de vérifier vos résultats à l'aide des images afin de renforcer la confiance dans vos conclusions. Les images ci-dessous illustrent la densité cellulaire attendue pour obtenir un résultat donné (en raison de leur mouvement, les images d'acariens ne sont pas incluses).

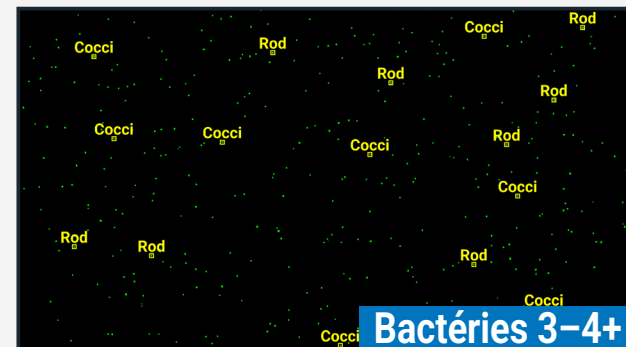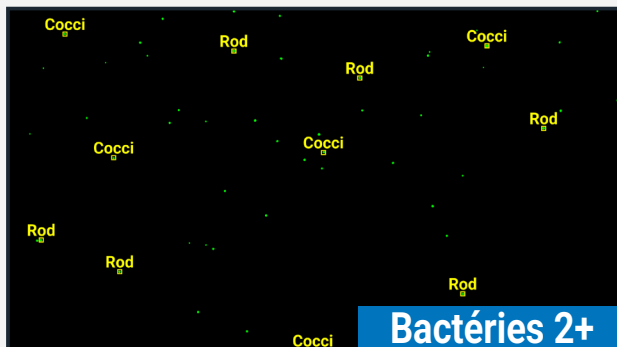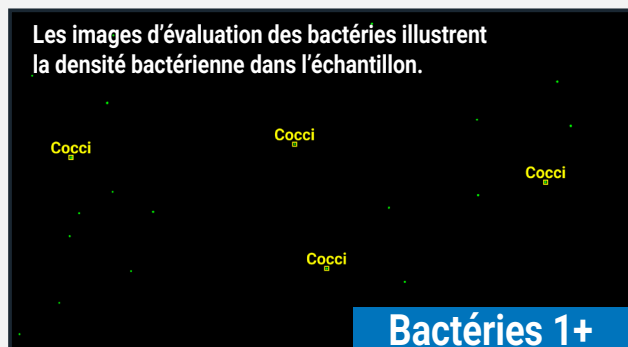

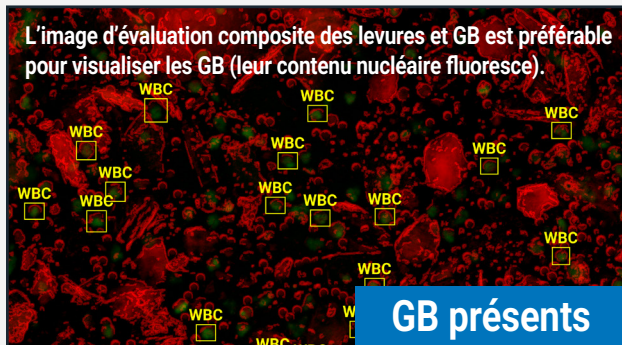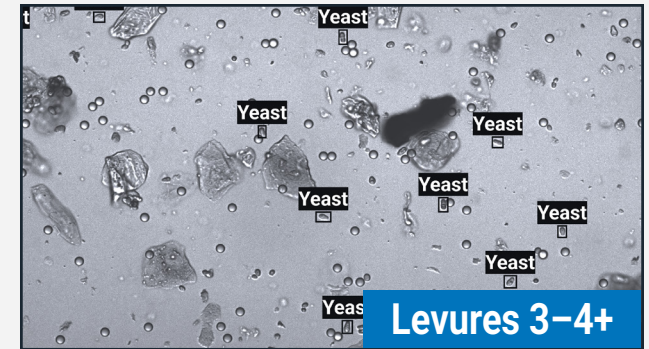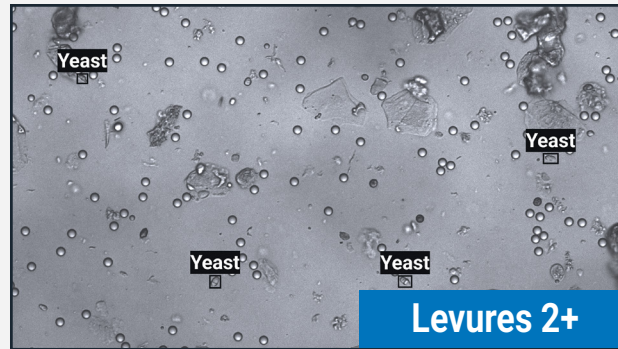

Tenez compte des signes cliniques de votre patient lors de l'interprétation des résultats.

Système de notation semi-quantitatif de la cytologie auriculaire IDEXX inVue Dx¹

Résultat	Description
0 (absence ou quantité infime)	Absence d'organisme ou présence en quantité très faible de levures, coques ou bacilles.
1+ (faible quantité)	Observation d'un faible nombre de levures, coques ou bacilles.
2+ (quantité modérée)	Observation d'un nombre modéré de levures, coques ou bacilles.
3-4+ (quantité importante)	Présence en quantité importante, voire très importante, de levures, coques ou bacilles.

¹ Système de notation modifié établi à partir de : Budach, S.C. and Mueller, R.S. (2012), Reproducibility of a semiquantitative method to assess cutaneous cytology. *Veterinary Dermatology*, 23: 426-e80.

IMPORTANT :

- + Interprétez toujours les résultats de cytologie dans le contexte des signes cliniques et des résultats de l'examen otoscopique. La cytologie seule ne permet pas de juger de la pertinence clinique.
- + La présence en faible quantité de bactéries ou de levures dans une oreille cliniquement normale n'est pas significative. Les oreilles ne sont pas stériles, la présence d'organismes en faible quantité peut correspondre à une flore commensale.
- + Les bacilles requièrent une attention particulière. Leur présence en quantité faible à modérée peut s'avérer significative lorsqu'elle est associée à une inflammation et à des signes cliniques. À l'inverse, la présence de bacilles en quantité infime au sein d'une oreille asymptomatique peut correspondre à une flore commensale ou transitoire.