


# Testez la gestation dans le lait en robot de traite



## Principe du test

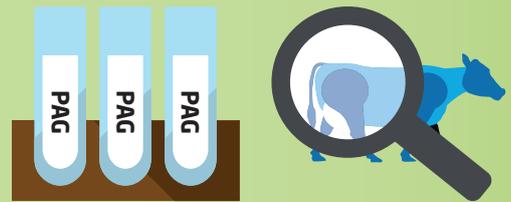

Ce test cible des protéines de la gestation, grâce à une analyse maîtrisée par votre laboratoire. Le test est réalisable dès 28 jours après l'insémination, sur les échantillons de contrôle de performances.

## Avantages du test de gestation en robot de traite



Contrôler les gestations sans bloquer les vaches : fini le stress et les embouteillages au robot lorsqu'on libère les vaches.



Des vaches debout moins longtemps, ce sont moins de cellules et moins de boîtiers.




Des contrôles de gestation précoces et fréquents, ce sont plus de vaches pleines et une meilleure rentabilité économique.

# FIABILITÉ DU TEST DE GESTATION EN ROBOT DE TRAITE

## Résultat de 3 études conduites en France

- Études conduites dans **3 Organismes de Conseils en Elevage** : dans l'Est et dans l'Ouest de la France
- **771 vaches** : contrôle des gestations par échographies, par analyse de données ou en fonction des dates de nouveau vêlage
- **15 élevages en test** : 14 Lely (réglage du temps de vidange de la pompe à vide à 9 secondes) et 1 DeLaval VMS 300 VMX

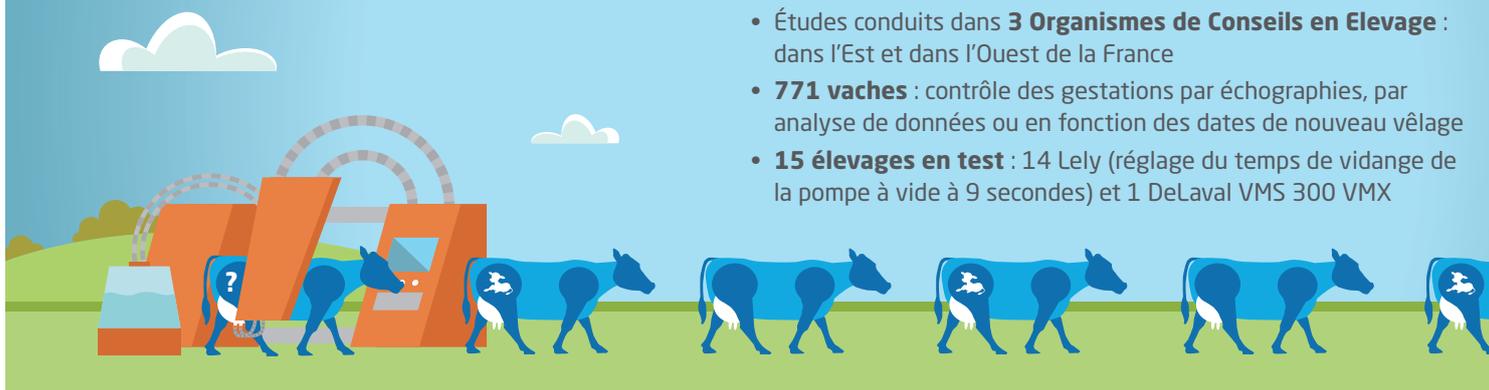

Conseil Elevage	ferme	nb de vaches testées	Vaches Gestantes			Vaches non Gestantes		
			Test positif	recheck	Test négatif	Test négatif	recheck	Test positif
 BCEL Ouest <i>Étude conduite de Février à Juillet 2019</i>	A (Lely A5)	51	22	1	0	25	0	3
	B (Lely A3 Next)	60	34	1	0	18	3	4
	C (Lely A3 Next)	101	50	0	0	46	2	3
	D (DeLaval 300 VMX)	41	22	0	0	19	0	0
 EILYPS <i>Étude conduite de Octobre 2017 à février 2018</i>	E (Lely A4)	32	19	0	0	13	0	0
	F (Lely A3)	84	61	0	0	21	1	1
	G (Lely A4)	63	38	0	0	19	5	1
	H (Lely A4)	75	68	0	0	3	3	1
	I (Lely A4)	37	30	0	0	3	1	3
	J (Lely A4)	27	17	0	0	8	2	0
	K (Lely A4)	47	25	0	0	20	1	1
 3CE Alsace Moselle <i>Étude conduite de Juin à Juillet 2018</i>	L (Lely)	30	16	0	0	12	1	1
	M (Lely)	47	26	0	0	17	4	0
	N (Lely)	42	23	0	0	10	6	3
	O (Lely)	34	20	0	0	14	0	0

	Vaches Gestantes	Vaches non Gestantes
Test positif	471	21
Test négatif	0	248

Sensibilité  
100%

Spécificité  
92,2%

À retester  
4,0 %

Fiabilité de  
**97,2 %**

Pour plus d'informations sur le test de gestation dans le lait, contactez votre entreprise de conseil élevage ou votre laboratoire habituel.

Découvrez tous les avantages:

[www.testez-le-lait.fr](http://www.testez-le-lait.fr) | [www.facebook.com/IDEXXElevageFR](http://www.facebook.com/IDEXXElevageFR)