




SNAP® Feline proBNP

Recommandations pour l'interprétation des résultats d'analyse

CHAT asymptotique avec anomalie auscultatoire (souffle, bruits de galop, arythmie...) ou dyspnéique

 **SNAP® Feline proBNP**
Associé à un bilan médical de base (NFS, Biochimie complète et ionogramme)

Normal

Anormal

Maladie cardiaque modérée à sévère peu probable

Maladie cardiaque probable



• Si souffle : retester tous les ans
• Si dyspnée : envisager et explorer hypothèse affection respiratoire

Suivre le protocole DPS



D
Dépistage

• Dosage de T4 (recherche hyperthyroïdie), des paramètres rénaux (urée, créat, SDMA), du NT proBNP quantitatif Cardiopet® proBNP

• Mesure de pression artérielle (recherche hypertension)

• Imagerie : échocardiographie, radiographies

P
Prise en charge

Traitement basé sur le diagnostic complet réalisé grâce à l'échocardiographie

S
Suivi

• Recontrôler Cardiopet® proBNP tous les 6 à 12 mois

• Suivi clinique

• Éducation et sensibilisation propriétaire

