



SNAP[®]4DX[®]Plus Anaplasmose

Recommandations pour l'interprétation des résultats d'analyse

Résultat SNAP[®]4DX[®]Plus positif = Exposition ? Infection ?

NFS, examen biochimique incluant la SDMA, électrolytes, analyse urinaire complète dont RPCU

PCR + Sérologie quantitative

Diagnostic

Examens + symptômes en faveur

Examens + symptômes pas en faveur

Traitement

Doxycycline 5 mg/kg M+S pendant 14 jours

Non recommandé

Suivi

- Contrôle NFS jusqu'à normalisation
- PCR 1 mois après arrêt traitement

Bilans rénaux réguliers incluant la SDMA

