



# SNAP<sup>®</sup>4DX<sup>®</sup>Plus Ehrlichiose

Recommandations pour l'interprétation des résultats d'analyse

**Résultat SNAP<sup>®</sup>4DX<sup>®</sup>Plus positif = Exposition ? Infection ?**

NFS, examen biochimique incluant la SDMA, électrolytes, analyse urinaire complète dont RPCU

PCR + Sérologie quantitative

Diagnostic	<b>Examens + symptômes en faveur</b>	Examens + symptômes pas en faveur
Traitement	<b>Doxycycline 10 mg/kg/j pendant 28 jours</b>	Non recommandé
Suivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôle NFS jusqu'à normalisation</li> <li>• Contrôle plaquettes 1 et 3 mois après traitement</li> <li>• PCR 1 mois après arrêt traitement</li> <li>• Sérologie quantitative 6 mois après traitement</li> </ul>	Bilans rénaux réguliers incluant la SDMA

