

Cyclage des tests SNAP IDEXX

Votre guide de préchauffage quotidien

Qu'est-ce que le cyclage ?

Le cyclage consiste à placer vos tests SNAP à température ambiante en les sortant du réfrigérateur, puis à les y remettre à la fin de la période de travail. Les tests SNAP utilisent la technologie ELISA, qui nécessite généralement une réfrigération pour maintenir son haut niveau de précision. En effectuant le cyclage de vos tests plus tôt dans votre journée de travail, vous éliminez le temps d'attente pour le préchauffage des tests, ce qui vous permet de réaliser des tests efficaces et précis tout au long de la journée.

Étape par étape :

- 1. Consultez le tableau (au dos de la page) :** référez-vous au tableau pour obtenir les limites de température et de cyclage pour chaque produit SNAP.
- 2. Minutez le cyclage :** notez le moment où vous sortez le produit du réfrigérateur afin de suivre la fréquence du cyclage.
- 3. Ne déballez pas les tests :** conservez les tests SNAP dans leur emballage en aluminium et le conjugué dans le flacon.
- 4. Utilisez les tests selon vos besoins :** lorsque vous souhaitez utiliser le test, vous n'avez pas besoin de le laisser préchauffer !
- 5. Remplacez rapidement au réfrigérateur :** si le produit n'est pas utilisé, il est nécessaire de le remettre au réfrigérateur dans le délai donné (8 ou 14 heures, selon le produit).



SPÉCIFICITÉS DE STOCKAGE	NOM DU TEST	DURÉE DE CYCLAGE MAXIMUM	RECOMMANDATIONS POUR LE CYCLAGE
À température ambiante OU au réfrigérateur (2 °C–25 °C ou 36 °F–77 °F)	SNAP® 4Dx® Plus [†]	14 heures	Peuvent être cyclés 30 fois maximum
	SNAP Leish 4Dx [†]	14 heures	
	SNAP Leishmania [†]	14 heures	
	SNAP® Heartworm RT	8 heures	
	SNAP® Parvo	8 heures	
Au réfrigérateur (2 °C–8 °C ou 36 °F–46 °F)	SNAP® Feline Triple®	14 heures	
	SNAP® cPL™	8 heures	
	SNAP® fPL™	8 heures	
	SNAP® Feline proBNP	8 heures	
	SNAP® FeLV	8 heures	
	SNAP® FIV/FeLV Combo Plus	8 heures	
	SNAP® Foal IgG	8 heures	
	SNAP® Giardia	8 heures	
	SNAP® Lepto	8 heures	
	SNAP® Cortisol	8 heures	

[†]La méthode de stockage peut avoir un impact sur la date d'expiration des tests SNAP 4Dx Plus, SNAP Leish 4Dx et SNAP Leishmania. Lorsque les tests sont conservés à température ambiante, leur date d'expiration est de 6 mois. Elle ne peut pas être prolongée en plaçant les tests au réfrigérateur. Lorsque les tests sont conservés au réfrigérateur, leur date d'expiration est celle indiquée sur l'emballage du produit.

Une assistance pour chaque test SNAP

Chaque test SNAP vous donne accès à un écosystème de diagnostic complet. Celui-ci comprend des algorithmes de diagnostic, des consultants médicaux, des tests de suivi en laboratoire de référence, et bien plus encore. Vous bénéficiez ainsi d'une assistance en clinique et bien au-delà.

Pour effectuer une commande, consultez le site commande.idexx.fr ou contactez votre représentant commercial.



© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-2690982-00 • La politique de confidentialité d'IDEXX est disponible sur [idexx.fr](https://www.idexx.fr).

*4Dx, SNAP, SNAP Pro et VetConnect sont des marques commerciales ou déposées d'IDEXX Laboratories, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.